



SICRASS
D's PRO

D's PRO

梅林猛 医師


(東京脊椎クリニック/理事長、院長)

UBEの際、高価な内視鏡スコープの破損を防止しながら、視野を獲得できるよう透明のカニューラを作りました。

スムーズな経路の獲得や神経のレトラクトにも役立ちます。




ご購入希望はこちらから

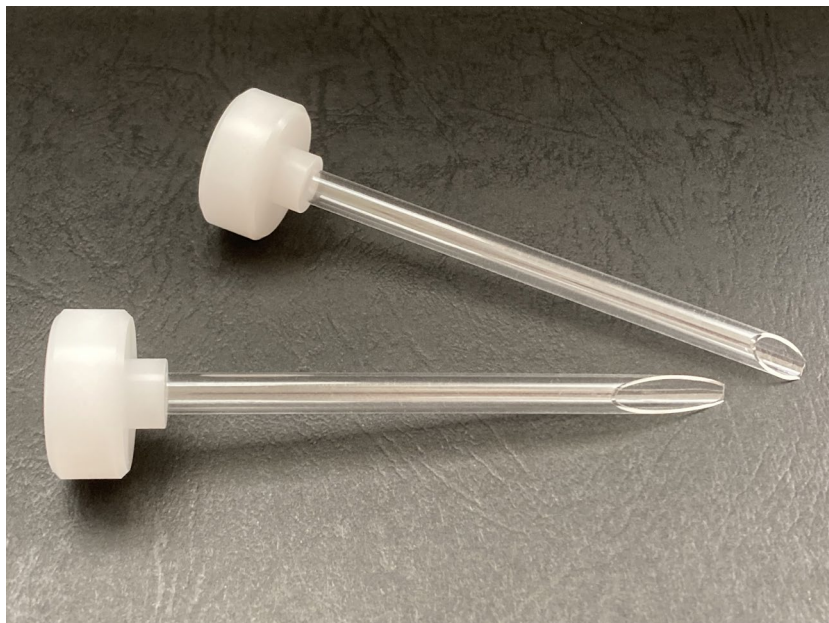

U-tube <内視鏡用カニューラ>

製品一覧			
製品番号	製品名	製品仕様等	販売価格
M0346	U-tube_スタンダード	φ 6/5×95mm (ポリカーボネート製)	¥5,000
M0416	U-tube_レトラクタ	φ 6/5×95mm (ポリカーボネート製)	¥5,000
一般医療機器／内視鏡用部品アダプタ			
届出番号：13B3X10312000094			

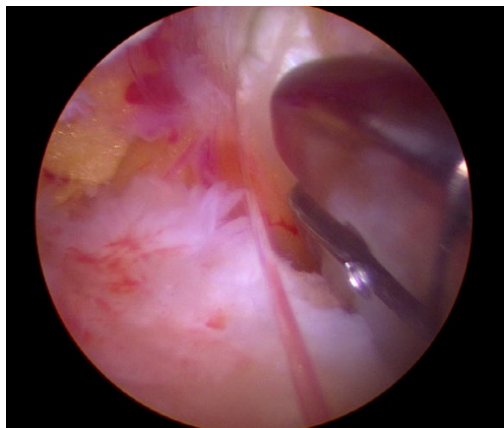


左手U-tubeで硬膜を牽引し、従来の顕微鏡手術のように椎間板を右手で摘出できる。

(M0416_U-tube_レトラクタ使用)



硬膜と黄色靱帯の間にU-tubeを入れ、剥離しているところ。水中下で容易に黄色靱帯を牽引し隙間ができる。

(M0416_U-tube_レトラクタ使用)

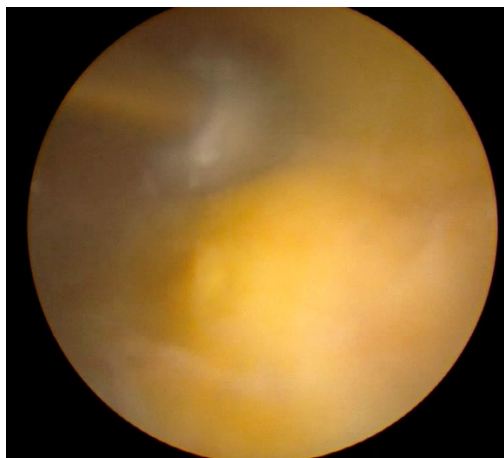

水中下でドリルを使用しているところ
水流がしっかりと保てるので、ホワイトアウトせず視認性が比較的保たれる。

(M0346_U-tube_スタンダード使用)

未洗浄・未滅菌製品です／EOG滅菌若しくはAC滅菌(120°・20分)が必要です。

繰り返しの使用による傷や歪みを確認した場合は使用を中止、廃棄して下さい。



製造販売元
株式会社マイステック

〒114-0012 東京都北区田端新町2-6-2
TEL:03-5656-4209
<http://www.meistec.co.jp>